

Инструкция по применению пасты для окрашивания и глазури

Введение :

В ответ на существующие пасты для окрашивания и глазирования цирконов с полным контуром, наша компания выпустила набор паст для окрашивания и глазирования, которые просты в работе и обладают высоким эстетическим эффектом. Набор паст для окрашивания и глазирования включает четыре основных оттенка ABCD, 18 цветов со специальным эффектом, глазурь, 3д натуральный оттенок+освежающая жидкость(можно внести небольшие дополнения, чтобы компенсировать недостатки формы).

В каждой бутылочке пасты содержатся ингредиенты для глазури. Нет необходимости наносить глазурь отдельно. Идеального эффекта можно добиться, если нанести ее один раз. Паста для глазури содержит мелкие частицы, не нужно смешивать порошок и жидкость перед использованием.

Чтобы добиться удовлетворительного эффекта по оттенку коронки, оттенки каждой пасты можно подбирать по желанию и использовать сразу после равномерного смешивания.

Сфера применения:

Полный циркон, коронки, металл фарфор,стеклокерамика

Способ окрашивания:

Хранить в сухом месте, оптимальная температура 12-38°c. После использования плотно закрутите крышку бутылки и поместите ее в стерильное место

Руководство по использованию цвета:


Внешний цвет красящей пасты	эффект
Песочно-желтый, желтый, солнечножелтый	может быть использован для представления эффекта структуры дентина
Синий, Дорожный синий	эффект прозрачного срезанного конца
Липовый, розовый	базовый цвет десны, срезаемый конец, ближе к середине края рта фиолетовал, розовая прозрачность или ближе к середине пояса коронки (тьень)
коричневый, терракотовый,	передняя язычная и задняя окклюзионные поверхности
Черный	можно смешивать с белой пастой для уменьшения яркости, специальная цветовая экспрессия на боковых зубных впадинах и бороздках
Теплый белый, чистый белый	вблизи дальнего края гребня, кальцификации и линии трещины
можно вносить коррективы в соответствии с реальными потребностями	

Способ окрашивания:

1. Особенности:

В каждой бутылочке пасты для окрашивания и глазури содержатся ингредиенты для глазури. Нет необходимости наносить глазурь отдельно. Идеального эффекта можно добиться, если окрашивать только один раз. Оттенки паст для окрашивания и глазури можно подбирать по желанию и использовать непосредственно после равномерного перемешивания

2. Для окрашивания передних и задних зубов используются следующие компоненты и пропорции смешивания:

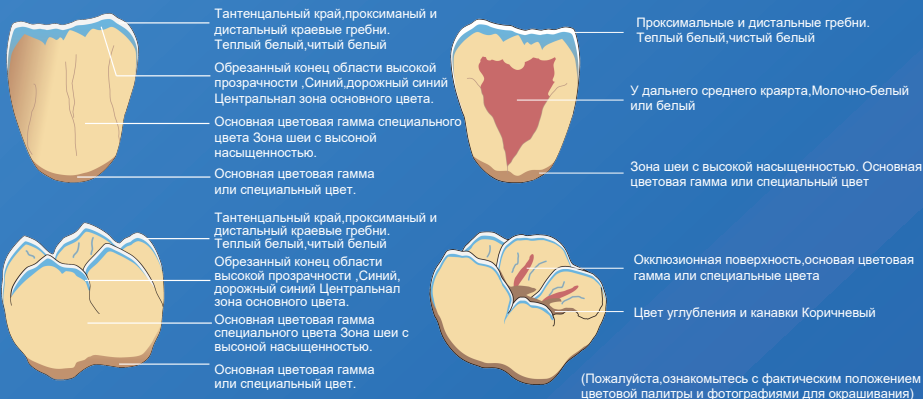

3. Прозрачная глазурь может быть нанесена непосредственно на точно оттеночные части реставрации. После окрашивания необходимо тщательно осмотреть поверхность, чтобы избежать пропусков. После спекания, если покрытие пропущено или цвет получился неточным, его можно повторно покрыть и снова спечь

4. После окрашивания не нужно сушить на воздухе, просто спекайте в соответствии со следующей кривой спекания.

Меры предосторожности

1. пожалуйста, не выливайте излишки глазури во флакон с пастой
2. Смешивайте пасту и жидкость поровну перед ежедневным использованием, чтобы обеспечить консистенцию и удобство работы с пастой во время применения
3. В каждой бутылочке пасты есть ингредиенты для глазури, поэтому нет необходимости наносить глазурь отдельно
4. Пожалуйста, используйте чистую и сухую кисточку для нанесения глазури не подмешивайте воду в пасту. Если подмешать воду, то после спекания будут образовываться частицы белого налета
5. В процессе приготовления пасты добавьте соответствующее количество разбавителя и тщательно перемешайте, чтобы в пасте не образовалось пузырьков
6. Используйте паровую или ультразвуковую очистительную машину для очистки поверхности перед нанесением пятен и глазури

Кривая спекания стандартной пасты

	Одиночная коронка мост из 3 единиц	спекание циркониевого Моста (4-7 единиц)	Половина рта	3D добавьте небольшое количество
Начальная температура [°C]	450	450	450	450
Время сушки [min]	5	6	7	5
Температура спекания [°C]	780	780	780	780
Время выдержки [min]	3	3	3	3
Медленное охлаждение [min]	5	7	10	в зависимости от устройства моста
Температура вынимания [°C]	500	400-300	200	в зависимости от устройства моста

Меры предосторожности

- Из-за разной температуры спекания, если реставрация не достаточно прозрачна, температура спекания или время выдержки может быть увеличено, что может улучшить результаты.
- Если возникли трещины, продлите время охлаждения или выньте при более низкой температуре, чтобы избежать микротрещин на поверхности диоксида циркония, вызванных быстрым охлаждением. Его необходимо устанавливать в зависимости от длины зубного моста.

Кривая спекания

